



IQ-8 Mobile

Bruksanvisning

Inhåll

1	Säkerhetsanvisningar	4
2	Leveransinnehåll och komponenter	5
3	Användningsändamål.....	6
4	Ibruktagnig	7
5	Rengöring av apparaten.....	8
6	Felsökning	9
7	Miljöanvisningar / Bortskaffande av apparaten	10
8	Tekniska data	10

För din säkerhet

Läs bruksanvisningen innan du tar apparaten i bruk. Följ anvisningarna. Spara denna bruksanvisning för senare behov.

Före första användning måste säkerhetsanvisningarna läsas ordentligt!

Om man inte följer bruksanvisningen och säkerhetsanvisningarna kan apparaten skadas och det kan vara farligt för användarens och andra personers säkerhet.

Om apparaten har skadats under transport ska apparaten inte tas i bruk. Meddela kontaktpersonen hos Led Suutari om eventuella skador som inträffat under transport.



UV-ljus kan inte ses med blotta ögat. Apparatens lock måste vara stängt när apparaten används.

UV-ljus gör att vissa typer av plast och gummi åldras för tidigt.

1 Säkerhetsanvisningar

- Det är förbjudet att ändra på apparatens konstruktion eller funktion. Ändringar kan medföra personsador eller fel i apparaten.
- Apparaten får endast repareras av Led Suutari Oy:s personal eller en av Led Suutari Oy auktoriserad reparatör.
- Apparaten producerar UVC-ljus med stor intensitet. UV-ljus är skadligt för ögon och hud. Undvik att öppna locket under en desinficeringscykel.
- Med apparaten får man endast desinficera föremål, apparater och instrument, men inte hud.
- Använd inte apparaten där det är fuktigt eller vått.
- Våta föremål får inte komma in i apparaten.

Apparaten får inte användas av barn eller fysiskt, psykiskt eller sensoriskt funktionshindrade eller oerfarna personer. De som svarar för säkerheten bör övervaka användningen av apparaten och ge anvisningar för hur den ska användas.


2 Leveransinnehåll och komponenter

Granska innehållet och dess skick. Meddela Led Suutari Oy:s kontaktperson om brister och fel.


Leveransinnehåll:

- IQ-8 Mobile desinficeringsapparat
- USB-Laddare
- USB-Laddningskabel, USB-A – USB-Micro
- Bruksanvisning


Komponenter

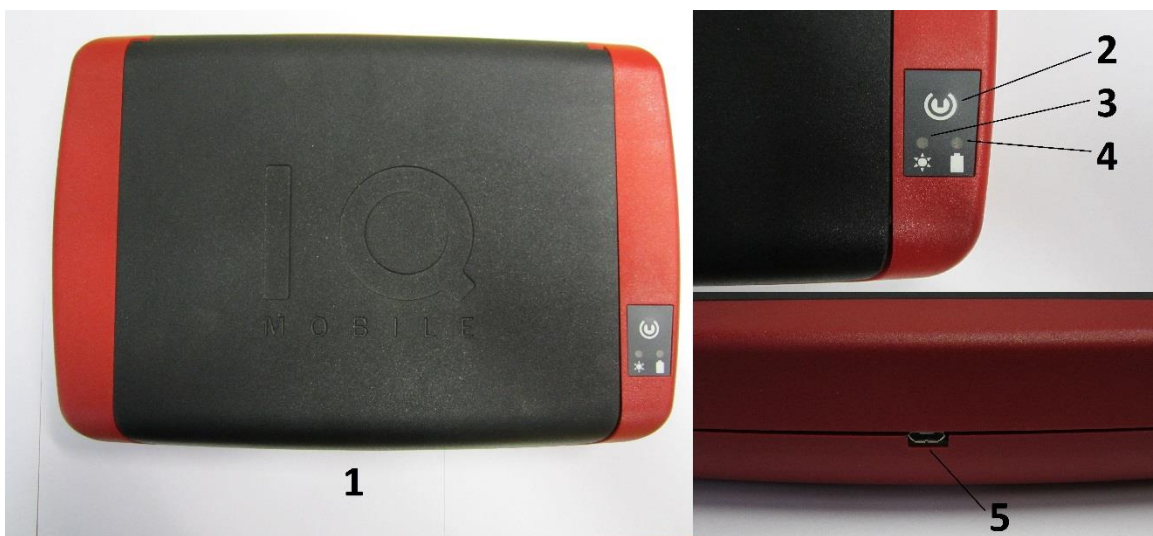

1. IQ-8 Mobile desinficeringsapparat
2. Startknapp
3. Signalljus för desinficeringscykeln
4. Signalljus för laddning
5. USB-laddningsuttag

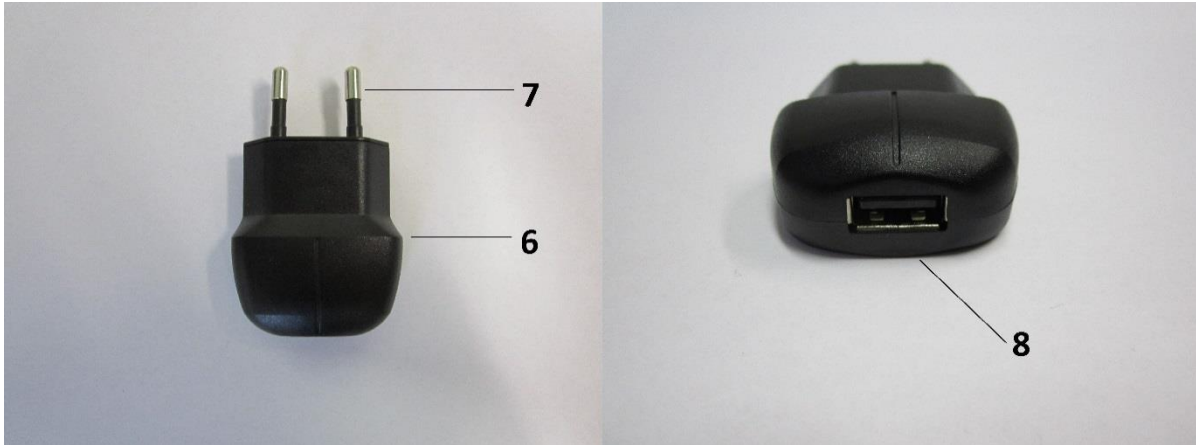

- 6. Laddare
- 7. Stickpropp
- 8. USB-A Anslutning

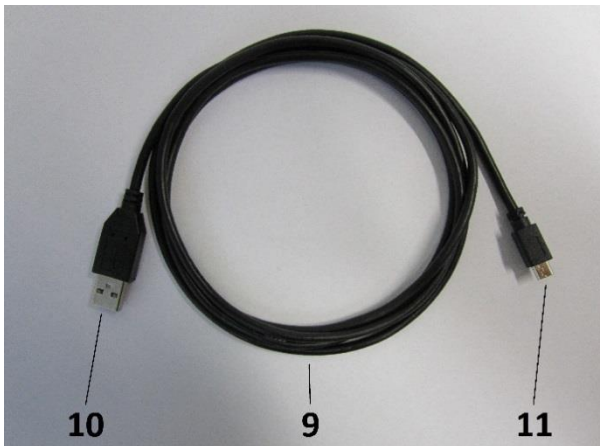

- 9. Laddningskabel (1,8 m)
- 10. USB-A uttag
- 11. USB-Micro uttag

3 Användningsändamål

Apparaten får endast användas enligt bruksanvisningen. Använd apparaten endast till desinficering av föremål, apparater och instrument, men inte hud.

Användaren svarar själv för skador som beror på att apparaten använts på sätt som strider mot användningsändamålet.

4 Ibruktagning

Innan apparaten tas i bruk ska ackumulatorn laddas helt upp!

Laddning

Obs! Använd endast den medföljande laddaren och kabeln för att ladda apparaten.

- Koppla den medföljande USB-laddningskabeln(9) till laddarens USB-A anslutning(8).
- Sätt laddarens stickpropp(7) i ett vägguttag.
- Sätt laddningskabelns USB-Micro uttag(11) i apparatens USB-laddningsuttag(5). Apparatsens signalljus för laddning(4) börjar blinka grönt. Om signalljuset inte blinkar, öppna och stäng locket. Signalljuset börjar blinka när locket har stängts.
- Ackumulatorn är helt uppladdad när signalljuset(4) lyser grönt hela tiden.

Apparaten kan laddas och användas samtidigt med undantag av den första användningen.

Desinficering

- Öppna locket.
- Sätt in det föremål som ska desinficeras i apparaten på tapparna i mitten.

Obs! Lysdioderna vid kanterna får inte täckas av föremålet. Detta försvagar desinficeringsseffekten. Undvik att beröra de metalldelar inne i apparaten som reflekterar UV-ljus. Även fläckar på reflexytorna kan försvaga desinficeringsseffekten.

- Stäng locket.
- Tryck på startknappen(2). Signalljuset för desinficeringscykeln(3) börjar blinka grönt och rött. Desinficeringen tar två minuter.
- Desinficeringen är klar när signalljuset för desinficeringscykeln(3) lyser grönt hela tiden.
- Öppna locket och ta ut föremålet.

Obs! För att desinficeringen ska vara effektivare och vara längre är det skäl att desinficera händerna innan man tar ut föremålet.

Man kan ta om en desinficeringscykel flera gånger efter varandra. Det gör man genom att öppna locket så att signalljuset för desinficeringscykeln(3) slocknar och trycka på startknappen(2) igen.

5 Rengöring av apparaten

Vid rengöring av apparaten bör man fästa uppmärksamhet vid rengöringsmedel och -redskap. Plast- och reflexytorna får endast rengöras med nedannämnda rengöringsmedel. Apparaten får inte rengöras med grova rengöringsmedel eller -redskap som skadar apparaten. Apparaten får inte sköljas med rinnande vatten eller sänkas i vatten.

Apparaten kan skadas av att man använder andra rengöringsmetoder eller -medel än dem som nämns i denna bruksanvisning.

Plastytorna

Vid rengöring av plastytorna bör man se till att inga rengöringsvätskor rinner ner i apparaten, i USB-uttaget eller på reflexytorna. Rengöringsmedel kan skada reflexytor och elektronik permanent.

- Vatten

Plastytorna kan rengöras med en mjuk duk som fuktats lätt med vatten.

- Desinfektionsmedel

Plastytorna kan torkas av med en mjuk duk som fuktats med desinfektionsmedel. Man kan även spreja desinfektionsmedel på ytan och torka bort det med en mjuk duk. Man bör dock akta sig för att det inte kommer desinfektionsmedel in i apparaten, i USB-uttaget eller på reflexytorna.

Reflexytorna

Vid rengöring av reflexytorna bör man undvika att beröra UV-LED-ljus och se till att det inte kommer rengöringsmedel i UV-LED-ljus. Man bör även undvika att gnida eller skura reflexytorna kraftigt – detta kan skada ytbeläggningen permanent. De inre ytorna desinficeras när apparaten startas tom.

- Würth Lens cleaning towelette

Med rengöringsduken kan man ta bort ganska svåra fläckar från reflexytorna. Rengöringsduken är för engångsbruk och det rengörande medlet avdunstar snabbt från duken efter att förpackningen öppnats.

6 Felsökning

Här är en förteckning över vanliga fel och vad man ska göra för att rätta dem. Om det inte hjälper, kontakta då Led Suutari Oy:s kontaktperson.

- **Apparaten startar inte**

Kolla att apparaten är helt uppladdad med den medföljande laddaren och kabeln. Om man använder andra laddare eller kablar kan uppladdningstiden bli betydligt längre och därför tar det längre tid att få apparaten att fungera.

Apparaten kan vara i så kallat vilotillstånd och fungerar först när den aktiveras. För att aktivera apparaten måste man öppna och stänga locket.

- **Apparaten blir inte laddad**

Apparaten kan vara i så kallat vilotillstånd och börjar först ladda upp sig när den aktiveras. Man aktiverar apparaten genom att öppna och stänga locket. Efter att locket stängts börjar apparaten ladda upp sig om den är kopplad till laddaren.

Använd i första hand den medföljande laddaren. Om man använder andra laddare eller kablar kan uppladdningstiden bli betydligt längre och därför tar det längre tid att få apparaten att fungera.

Kontrollera att uttagen är ordentligt kopplade och helt inne. Det måste finnas nätström när du använder den medföljande laddaren med stickpropp.

- **Signalljusen blinkar på ovanligt sätt**

Det tyder på ett fel i apparaten om signalljus för laddning eller desinficeringscykel blinkar på ett sätt som inte nämns i bruksanvisningen. I så fall bör man inte använda apparaten.

Signalljusens betydelser:

Signalljus för laddning:

- Blinkande grönt
Apparaten laddar ackumulatören
- Kontinuerligt lysande grönt
Ackumulatören är uppladdad

Signalljus för desinficeringscykel:

- Blinkande grönt/rött
Desinficering pågår
- Blinkande rött
 1. Locket har öppnats under desinficering och desinficeringen har avbrutits
 2. Locket är öppet
- Kontinuerligt lysande grönt
Desinficeringen är klar

7 Miljöanvisningar / Bortskaffande av apparaten



Apparaten ska inte bortskaffas med blandat avfall. Låt tillverkaren bortskaffa apparaten.

8 Tekniska data

IQ-8 Mobile:

Desinficeringsstid	2 minuter
Driftstemperatur	0 – 50 °C
Laddningstid	300 – 400 minuter

	IQ8/50	IQ8/100	IQ8/200	IQ8/300	IQ8/600
Yttre mått					
Bredd (mm)	289	289	289	289	289
Vidd (mm)	202	202	202	202	202
Höjd (mm)	48	151	255	356	667
Inre mått					
Bredd (mm)	190,5	190,5	190,5	190,5	190,5
Vidd (mm)	129,5	129,5	129,5	129,5	129,5
Höjd (mm)	36	139	242	345	651

Laddare:

Typ	FW7713/EU
In (nätanslutning)	100-240V 50/60Hz 150mA
Ut (USB-anslutning)	5V/1000mA