


TRICUFF®

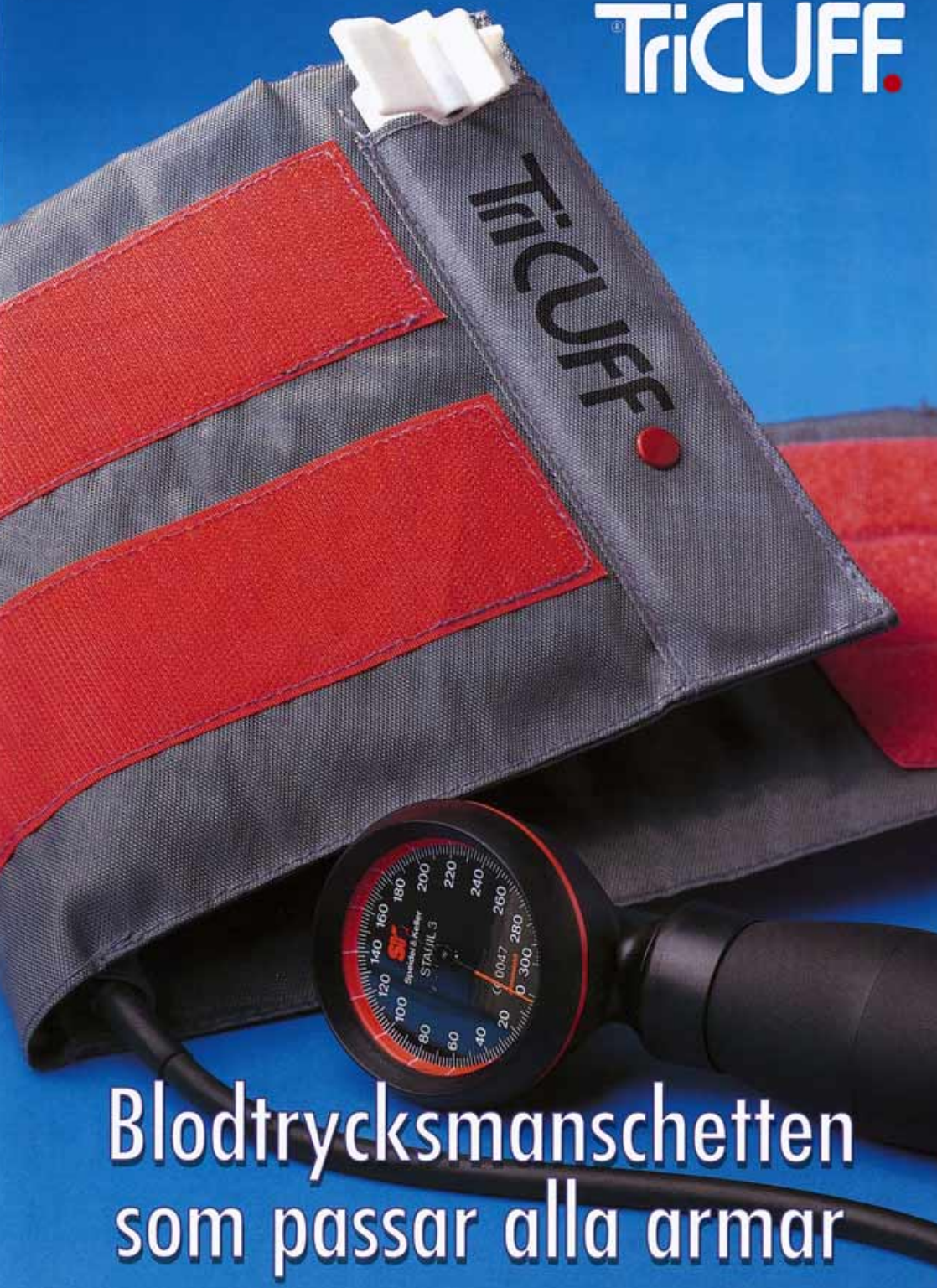


Blodtrycksmanschetter  
som passar alla armar


# problem...

## Falska mätvärden

Människor varierar i kroppsstorlek och så gör armomfånget. Storleken på en blodtrycksmanschett måste anpassas till patientens armomfång.

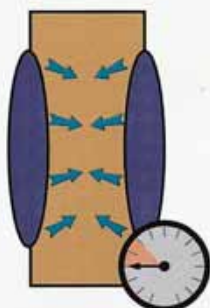


För bred manschett ger  
FALSKT LÅGA värden.

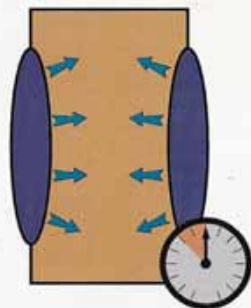


För smal manschett ger  
FALSKT HÖGA värden.

## Rätta mätvärden


TriCuff ger rätta mätvärden oavsett armomfång. TriCuff väljer automatiskt rätt bredd. Manschettens konstruktion ger en stabilitet som andra blodtrycksmanschetter saknar.

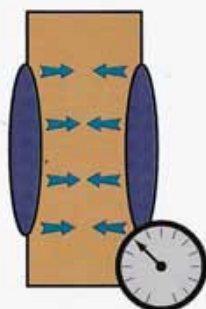

Smal

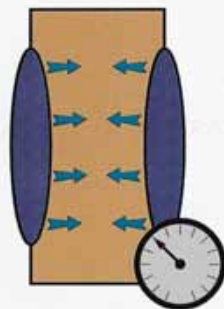

Normal

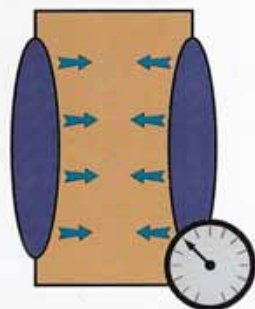

Tjock

TriCuff passar alla armar



Tre-blåsor-i-en

## Automatisk anpassning.

Trippelmanschetten har tre separata blåsor med olika bredder. 9 cm för smala armar (Ø 15 - 21 cm), 12 cm för normala armar (Ø 22 - 32 cm) och 15 cm för tjocka armar (Ø 33 - 42 cm). När manschetten sätts runt patientens arm väljs automatiskt rätt manschettbredd.

## Säkrare mätvärden.

Jämförande studier (simultana intraarteriella och indirekta mätningar) visar att TriCuff har en mycket hög tillförlitlighet (specificitet 0,98) jämfört med standardmanschetter (specificitet 0,75).

## Kliniskt utvärderad

Sedan de grundläggande studierna för indirekt blodtrycksmätning genomfördes har ett antal mindre lyckade modifieringar gjorts på standardmanschetten. I dag är TriCuff den enda manschett som testats kliniskt och jämförts med intraarteriella mätningar.

TriCuff passar till alla kvalitetsinstrument.



## Så används TriCuff



Mer är 35000 TriCuff sålda i Sverige

**Några referenser:** Danderyds Sjukhus, Södersjukhuset, Hudinge Sjukhus, S:t Görans Sjukhus, Gustavsbergs Vårdcentral, Sala Lasarett, Malmö Sjukhus, Sabbatsbergs Sjukhus, Åkersberga sjukhus, Dalens Sjukhus, Kungälv Sjukhus, Åreklinierna, Dalens Vårdcentral, Vårdcentralen Rosengård, Lisebergs Vårdcentral, Vendelsö Vårdcentral, Vårdcentralen Hertig Knut, Stockholm Heart Centre, Kvartersskutan PVO1, Vårdcentralen Vinberg, Bärby Ungdomshem, Bergnäsens Vårdcentral, Stocksunds Vårdcentral, Hotell- och Restauranghälsans i Stockholm, Jakobsbergs Sjukhus, Tibro Vårdcentral, Djursholms Vårdcentral, Älvjös Vårdcentral, Gubbängens Vårdcentral, Vaxholms Vårdcentral, Bollnora Vårdcentral, Lunds Lasarett, Fittja Vårdcentral, Huvudsta Vårdcentral, Lasarettet i Norrköping, Gällivare Lasarett, Piteå Lasarett, Falu Lasarett, Arvika Lasarett, Sochska Barnsjukhuset, Vårdcentralen Smedby-Runby, Öregrunds Vårdcentral, Saphiahemmet, Grytnäs Vårdcentral, Vårdcentralen i Ödesåhö, Tjörns Vårdcentral, Vårdcentralen Sjuntorp, Gruppboenden Älvan, Företagshälsövården i Degerfors, Löddeköpings vårdcentral, Sörö Vårdcentral, MediVården AB, Håstveda Vårdcentral, Husläkargruppen Oasen, Körna Vårdcentral, Styröhemmet, Vårdcentralen Värmlands Nysäter, Karolinska Sjukhuset, Vårdcentralen Borlänge Sjukhus, Barkaby Vårdcentral, Arnells Optik, Örnäsens Vårdcentral, Lerums Vårdcentral, Hamränge Hälsocentral, Företagshälsövården Atlas Copco, Stensåsökan, Företagshälsövården Siemens, Gylle Vårdcentral, Kvinnohälsökan AB, Örnäsölviks Sjukhus, Enebybergs Husläkarmottagning, Hede Hälsocentral, Uggledals Älderdomshem m.fl.

**AJ Medical**  
Box 10022  
181 10 Lidingö

Tel: 08-767 29 70

Fax: 08-767 29 82

www.ajmedical.se